

GEBRAUCHSANWEISUNG

Der Total Lifter von MedSource ist eine Transportunterlage mit einer Tragfähigkeit von bis zu 450kg. Das Tragetuch ist so auszurichten, dass sich die Gurte für die Haltegriffe auf der dem Patienten gegenüberliegenden Seite befinden. Der Total Lifter ist für die Verwendung durch entsprechendes Fachpersonal für das Anheben und Transportieren / Überführen von Patienten vorgesehen. Es sollten mindestens 4 Personen für einen sicheren Transport/ eine sichere Überführung zur Verfügung stehen, um einen eventuellen Unfall oder eine Verletzung zu vermeiden. Haltegriffe in einer Richtung wie die Helfer umfassen, die die Transportunterlage auf den gegenüberliegenden Seiten anheben (HALTEGRIFFE NICHT KREUZEN). Der Total Lifter kommt insbesondere dort zum Einsatz, wo keine Wirbelsäulenstabilisierung oder Zugkraft für den zu transportierenden Patienten benötigt wird. Ist der Total Lifter beschädigt, verschlissen, eingerissen oder verschmutzt, unverzüglich durch einen neuen ersetzen.

Hinweise zur Verwendung

Der Total Lifter von MedSource dient als manuelle Transportunterlage für die Notfallversorgung und sollte von mindestens 4 bzw. vorzugsweise 6 Personen angewendet werden. Mit dem Total Lifter können Opfer und Patienten angehoben, bewegt und herausgezogen werden.

Schritt 1: Das Tuch wird in seiner gesamten Länge unter dem Patienten platziert.

Schritt 2: Jede Person greift zwei Haltegriffe (jeweils einen pro Hand).

Schritt 3: Patienten ausschließlich mittels empfohlener/ anerkannter und geeigneter Sicherheitstechnik anheben und bewegen.

Größe und Gewicht

107 x 183 cm; 900 g

Material

Polyesterfasern - nicht gewebt und gewebt mit antimikrobiellen Eigenschaften.

Tragfähigkeit

Trägt bis zu 450 kg

Tragfähigkeit pro Griff 110 kg

Flüssigkeitsbeständigkeit








Beständig gegenüber folgenden Flüssigkeiten:

Öle, Alkohol, milde Reinigungsmittel, Getriebe- und Bremsflüssigkeiten

Verpackung

1 pro Polybeutel,

10 pro Karton

| | |
|---|------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung beachten |
|  | Nicht Steril |
|  | Informationen beachten |
|  | Adresse des Herstellers |
|  | EU Bevollmächtigter |
|  | Teilenummer |
|  | Nicht zur Wiederverwendung |

Total Lifter



MS-95200

 MedSource

8600 Shelby Court, Chanhassen, MN 55317 USA

952-472-0131

www.medsourcelabs.com